

## 1. VORBEREITUNG

### ANSCHLIESSEN

- ✓ Beiliegenden Entnahmeschlauch (B) an Kollektor anschliessen:
  - LuerLok-Adapter (C) belassen,
  - 60cc-Adapter (D) am anderen Schlauchende so kurz wie möglich abschneiden,
  - offenes Schlauchende auf L-Winkel am Kollektorboden (A) fest aufschieben.
- ✓ Weiße Klemmen (2) und (7) verschliessen
- ✓ Absaugschlauch zur Absaugpumpe an Anschluss (1) anschliessen
- ✓ Absaugschlauch zum Patienten an Anschluss (4) anschliessen

### VORBEFÜLLEN

- ✓ 300 ml NaCl 0,9% durch Öffnung (5) einfüllen, Trichter (6) vollständig bedeckt
- ✓ Deckelöffnung (5) verschliessen

### SOG EINSTELLEN

- ✓ Absaugschlauch zum Patienten (4) kurzzeitig abklemmen und Sog bei geschlossenem System auf max. 0,5 - 0,6 bar (= 460 mmHg) einstellen

## 2. BEREIT ZUR LIPOASPIRATION!

### 3. SEPARATION UND ENTNAHME DES EIGENFETTS

- ✓ Lipoaspirations - Kanüle vom Absaugschlauch diskonnektieren

### FLÜSSIGKEIT ABSAUGEN

- ✓ Klemme (2) am Deckel öffnen
- ✓ Abgesetzte Infiltrationsflüssigkeit wird durch integriertes Steigrohr vollständig abgesaugt

### OPTIONAL

- ✓ Bei unzureichender Absaugung der Infiltrationsflüssigkeit: zentralen Schlauch am Deckel (3) abklemmen

### ZWISCHENSCHRITT FÜR GROSSE VOLUMINA

- ✓ Falls Lipo-Aspiration nach Flüssigkeits-Absaugung fortgesetzt werden soll: Flüssigkeit nur bis zur Oberkante des Trichters absaugen, Klemme (2) wieder schliessen

### EIGENFETT ZUR REINJEKTION UMFÜLLEN

- ✓ Restflüssigkeit am Entnahmeschlauch (C) entnehmen und werfen
- ✓ Eigenfett in LuerLok-Spritzen aufziehen

